



Solicite asistencia

Ajustes del motor para fresado e instalación del Adin Implant System



Ajustes del motor de implantes

Uso	Fresa Lanza y Fresa Piloto DLC Ø 2,0 mm	Resto de fresas de la secuencia	Instalación del implante	Tornillo de cierre y Pilar de cicatrización*
Relación de giro CA	20:1	20:1	20:1	20:1
Torque máximo	35 Ncm	35 Ncm	50 Ncm	10 Ncm
Velocidad	800 rpm	1,200 rpm	Mínima ajustable	Mínima ajustable
Sentido del giro	Horario	Horario	Horario	Horario
Irrigación 0-5	3-4	3-4	0	0

* Nota: se recomienda preferentemente la instalación manual