




Solicite asistencia

Secuencias de fresado para Touareg CloseFit™

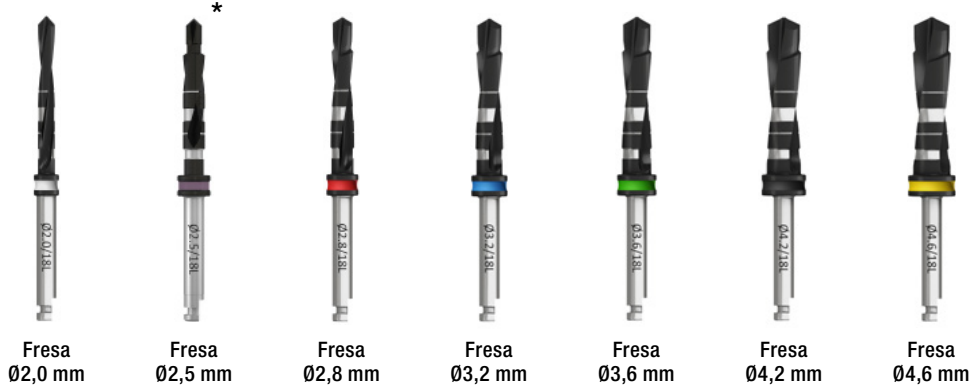

Fresado en hueso blando							
UNP Ø 2,75 mm	•						
NP Ø 3,0 mm	•						
RP Ø 3,5 mm	•	n/a	•	•			
WP Ø 4,3 mm	•	n/a	•	•	•		
WP Ø 5,0 mm	•	n/a	•	•	•	•	

Fresado en hueso denso							
UNP Ø 2,75 mm	•	•					
NP Ø 3,0 mm	•	n/a	•				
RP Ø 3,5 mm	•	n/a	•	•			
WP Ø 4,3 mm	•	n/a	•	•	•		
WP Ø 5,0 mm	•	n/a	•	•	•	•	•

● Nota: solo en zona cortical

● Nota: en huesos muy densos podría requerir pasar más de una vez la fresa indicada o bien insinuar la punta de la siguiente fresa en la secuencia. Por su diseño de dos etapas, las fresas de Adin incorporan función avellanadora.

* La fresa Ø2,5 mm se emplea únicamente en implantes de Ø2,75 (UNP). No forma parte de la secuencia del resto de medidas de implantes Adin.



CloseFit™

Conical Hex connection

El sistema de implantes espirales Touareg CloseFit™ ofrece una conexión cónica, fuerte y estable. La conexión CloseFit™ minimiza los micro movimientos y las micro filtraciones, en consecuencia, minimiza las complicaciones mecánicas y mantiene el nivel de los tejidos.

Los implantes Touareg CloseFit™ cuentan con la superficie OsseoFix™ de alta pureza y enriquecida con fosfato de calcio, con niveles intermedios de rugosidad, que ha demostrado aumentar la tasa contacto entre el hueso y el implante (BIC) y la fijación biomecánica temprana.

