


Secuencias de fresado para UniFit™

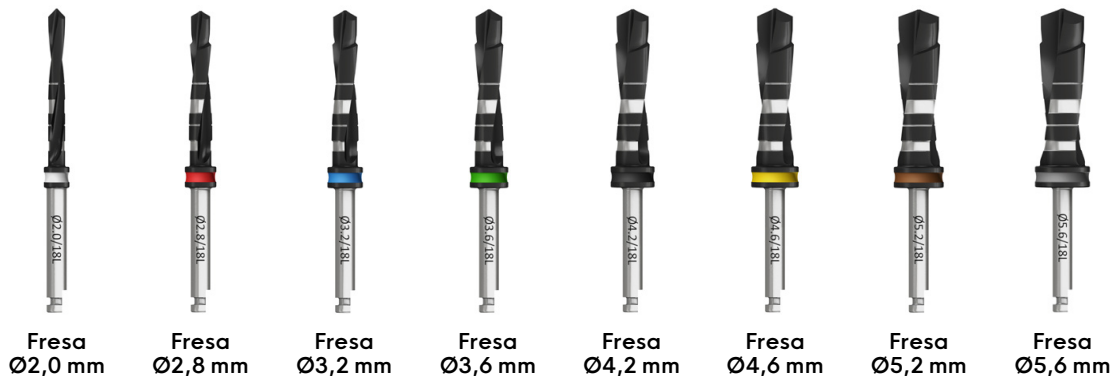

Fresado en hueso blando (tipo III y IV)								
	Ø2,0 mm	Ø2,8 mm	Ø3,2 mm	Ø3,6 mm	Ø4,2 mm	Ø4,6 mm	Ø5,2 mm	Ø5,6 mm
Ø 3,5/3,75 mm	•	•	•					
Ø 4,3 mm	•	•	•	•				
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•			
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	

Fresado en hueso denso (tipo I y II)								
	Ø2,0 mm	Ø2,8 mm	Ø3,2 mm	Ø3,6 mm	Ø4,2 mm	Ø4,6 mm	Ø5,2 mm	Ø5,6 mm
Ø 3,5 mm	•	•	•					
Ø 3,75 mm	•	•	•	•				
Ø 4,3 mm	•	•	•	•	•			
Ø 5,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	
Ø 6,0 mm	•	•	•	•	•	•	•	•

● Nota: solo en zona cortical

● Nota: en huesos muy densos podría requerir pasar más de una vez la fresa indicada o bien insinuar la punta de la siguiente fresa en la secuencia. Por su diseño de dos etapas, las fresas de Adin incorporan función avellanadora.

UniFit™

Implantes UniFit™, con conexión cónica unificada en todos los diámetros de implante. Con más de 30 años de experiencia en implantología, hemos tomado lo mejor de nuestro sistema y lo hemos combinado en el implante UniFit™.

Con UniFit, una conexión protésica sirve para todos. Esto significa que TODAS las prótesis y accesorios se ajustan a TODOS los implantes UniFit de cualquier tamaño y diámetro. No hay múltiples tamaños de driver o de transfer ni de análogos. ¡No más espacio de almacenamiento para todos los aditamentos adicionales!

Nuestro innovador diseño de implante cuenta con una conexión cónica de 7° con indexado en forma de estrella de seis posiciones que simplifica los procedimientos quirúrgicos y de restauración.

